

## Noodgevalkaart



Ik draag een medisch noodzakelijk apparaat bij me op voorschrift van mijn arts.

**Medtronic**

### Neem in geval van nood contact op met:

Naam arts:

Telefoonnummer:

Contactpersoon voor noodgevallen:

Telefoonnummer:

### Ik heb diabetes.

Als mijn bloedsuikerspiegel extreem laag is, kan ik me vreemd gedragen, dronken lijken of bewusteloos zijn.

### Ik ben niet dronken. Bel het alarmnummer voor hulp.

Als ik bij kennis ben en kan slikken, geef me dan iets te eten of drinken met suiker, bijvoorbeeld: sap, snoep, frisdrank (geen light). Geef me niets te eten of te drinken als ik bewusteloos ben.

### Professionele zorgverleners

Ik draag een externe insulinepomp.

- De pomp dient snelwerkende insuline toe met een constante infusiesnelheid.
- Insulinetoediening van de pomp stopzetten:
  - Druk op een willekeurige knop om de pomp uit de slaapstand te halen.
  - Druk op de menuknop .
  - Druk op de gemarkeerde knop op het scherm om de pomp te ontgrendelen.
  - Druk op  om **Toediening stoppen** te selecteren.
  - Druk op de rechterknop  $\gt$  om **Ja** te markeren.
  - Druk op  om de insulinetoediening te stoppen.
- De pompbatterij **niet** verwijderen.
- De pomp **niet** loskoppelen zonder medische toestemming.
- Als de pomp een alarm laat horen, moet u de instructies op het pompscherm opvolgen of de lokale Medtronic Diabetes-vertegenwoordiger bellen (zie hieronder).

### Lokale Medtronic Diabetes-vertegenwoordiger

Naam:

Telefoonnummer:

## Vliegveldbeveiliging



**Ik draag een medisch noodzakelijk apparaat bij me op voorschrift van mijn arts.**

**Medtronic**

### Vliegveldbeveiliging:

- Uw pomp mag niet door röntgenapparatuur voor controle van handbagage of ruimbagage.
- De lichaamsscanner is ook een vorm van röntgenstraling. Als u door de lichaamsscanner gaat, moet u uw insulinepomp en een eventuele sensor en zender voor continue glucosemonitoring (CGM) eerst afdoen.
- Uw infusieset moet van uw lichaam losgekoppeld zijn als u de lichaamsscanner passeert.
- U kunt ook om een alternatieve controlemethode zonder röntgen vragen, zodat u uw apparaten niet af hoeft te doen.
- Uw insulinepomp, infusieset, reservoir en CGM-systeem zijn bestand tegen blootstelling aan metaaldetectoren zoals gebruikt voor controle op luchthavens.

### Patiëntinformatie

Mijn naam:

Adres:

Telefoonnummer (thuis):

### Informatie over het medische apparaat

Type medisch apparaat:

Serienummer van het apparaat:

© 2018 Medtronic. Alle rechten voorbehouden. Medtronic, het Medtronic-logo en Further, Together zijn handelsmerken van Medtronic. Alle andere merken zijn handelsmerken van (een dochteronderneming van) Medtronic.

# Medtronic



Medtronic MiniMed  
18000 Devonshire Street  
Northridge, CA 91325  
USA  
800 646 4633  
818 576 5555

EC REP

Medtronic B.V.  
Earl Bakkenstraat 10  
6422 PJ Heerlen  
The Netherlands

6025835-103\_A