

# Aanvullende tips om de Enlite™-sensor of Guardian™ sensor 3 af te plakken

## TIPS OM DE PLEISTER BETER TE LATEN HECHTEN




### TIP 1: Vloeibare huidlijm

Hiermee brengt u een extra kleeflaag aan op uw huid waardoor de pleister beter hecht.

**Belangrijk: Breng de huidlijm pas aan nadat de sensor is ingebracht.**

**1** Verwijder de naaldbehuizing als volgt. Houd de sensor bij de basis voorzichtig tegen uw huid met één hand. Pak de naaldbehuizing met uw andere hand aan de bovenkant vast en trek deze langzaam recht omhoog van de sensor af.


**2** Breng de huidlijm aan onder de witte plakstrip van de sensor (verwijder na het aanbrengen pas de folie), en op de huid waarop u de twee andere pleisters aanbrengt.

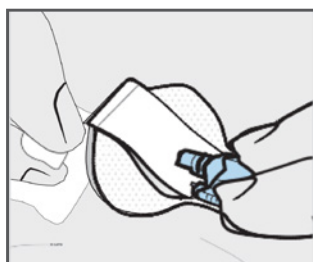


**3** Laat de huidlijm minimaal 20 seconden drogen alvorens de pleisters aan te brengen.\*



**4** Verwijder de folie en druk de plakstrip stevig op de huid. Strijk deze rondom glad, zodat de plakstrip goed op de huid plakt.

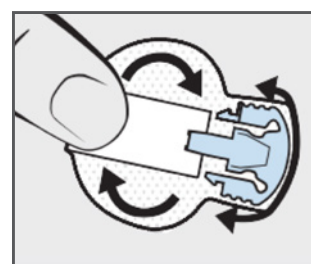

**5** Breng de eerste pleister aan zoals weergegeven.

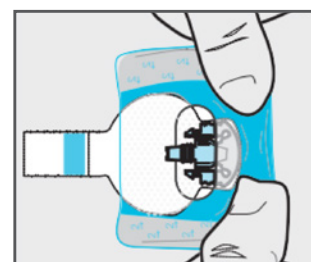

### PRODUCTOPTIES:

**Skin-Tac™ wipes:** Deze doekjes bevorderen de hechting van de pleister op de huid en creëren een beschermlaag tussen huid en pleister.



Voor meer informatie raadpleeg [www.medtronic-diabetes.nl](http://www.medtronic-diabetes.nl) of neem contact op met het MiniMed™ Care-team via het gratis nummer **0800 - 342 23 38**.

\* Raadpleeg altijd de gebruiksaanwijzing of gebruikershandleiding van de fabrikant voor de juiste toepassingsinstructies.

# Aanvullende tips om de Enlite™-sensor of Guardian™ sensor 3 af te plakken

## TIPS OM DE PLEISTER BETER TE LATEN HECHTEN




### Tip 2: Extra pleister

Plak een extra pleister over de sensor en zender voor een betere fixatie.

### Afplakmethode voor zowel de Enlite™-sensor als de Guardian™ sensor 3.


#### OPTIE 1:

Biedt extra veiligheid en voorkomt huidirritatie door de opbouw van vocht.

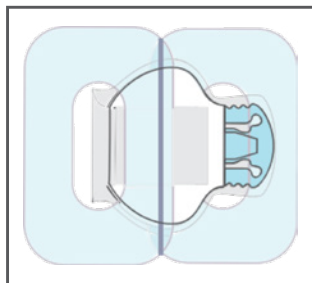

#### OPTIE 2:

Biedt extra veiligheid en voorkomt dat de zender aan uw kleding blijft haken.

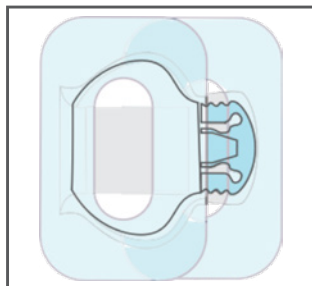

### PRODUCTOPTIES:

Andere beschermende pleisters kunnen in de juiste vorm worden gesneden en over de zender worden geplaatst\*:

**Tegaderm™-film:** Bestaat uit een dunne filmlaag met een latexvrije, hypo-allergene kleeflaag. Deze pleister is ook waterdicht.

**IV3000™:** Dunne, transparante pleister voor zowel een verbeterd comfort als een goede fixatie.

## TIPS OM HUIDIRRITATIE TE VERMINDEREN EN HET COMFORT TE VERBETEREN




### Tip 3: Veegdoekjes die een klevende barrièrelaag vormen

Aanbrengen op de huid voordat u de pleisters aanbrengt om huidirritatie te verminderen.

### Belangrijk: Breng de klevende barrièrelaag pas aan nadat de sensor is ingebracht.

- 1 Verwijder de naaldbehuizing als volgt. Houd de sensor bij de basis voorzichtig tegen uw huid met één hand. Pak de naaldbehuizing met uw andere hand aan de bovenkant vast en trek deze langzaam recht omhoog van de sensor af.
- 2 Breng de klevende barrièrelaag aan onder de witte plakstrip van de sensor (verwijder na het aanbrengen pas de folie), alsook het stukje huid waarop u de twee andere pleisters aanbrengt.
- 3 Laat de klevende barrièrelaag 20 seconden drogen alvorens pleisters aan te brengen.\*

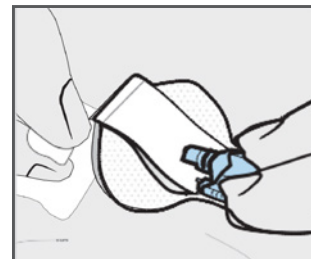

### PRODUCTOPTIES:

**3M™ Cavilon™-spray:** Een barrièrefilm die een preventieve huidbescherming biedt.

**Skin-Tac™-wipes:** Bevordert de hechting van de pleister op de huid en creëert een beschermlaag tussen huid en pleister.

**Opmerking:** De horizontale positie van de sensor en zender in deze handleiding is voor demonstratiedoeleinden. Verticale oriëntatie, met een zender die boven of onder de sensor is geplaatst, kan voor sommige patiënten de voorkeur hebben.

\* Raadpleeg altijd de gebruiksaanwijzing of gebruikershandleiding van de fabrikant voor de juiste toepassingsinstructies.

Medtronic Trading NL B.V.

Earl Bakkenstraat 10  
NL-6422 PJ Heerlen

diabetes.benelux@medtronic.com  
Tel.: 0800 342 23 38  
vanuit het buitenland: 0031 45 566 82 91  
Fax: +31 (0) 45 566 82 77

UC202003135NL © Medtronic 2019.  
Alle rechten voorbehouden.  
Gedrukt in Europa.

**Medtronic**  
Further, Together