



UPLOAD HANDLEIDING

Nieuwe CareLink™ Personal uploader


EENMALIG TOEVOEGEN VAN UW POMP OF METER IN 4 STAPPEN

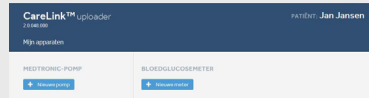


1 Kies nieuwe pomp of nieuwe meter

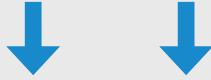


Pomp

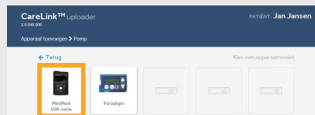

2 Selecteer het type pomp

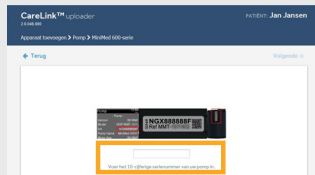

3 Voer het serienummer van uw pomp in

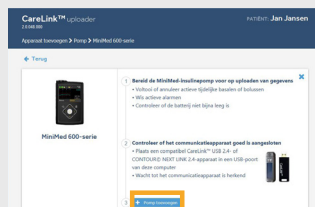


4

- Zorg dat uw pomp gereed is
- Klik "Pomp toevoegen"

Meter



2 Selecteer het merk van uw meter indien u alleen data van uw meter wil uploaden

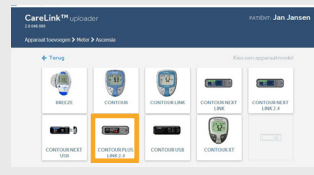

3 Selecteer het model van uw meter



4

- Zorg dat uw meter gereed is
- Klik "meter toevoegen"

VOORDAT U UW POMP UITLEEST:

Sluit uw meter of CareLink™ USB aan uw computer

- Meter of USB aansluiten en zo dicht mogelijk bij uw pomp
- Zorg dat uw pomp en meter verbonden blijven



Zorg dat uw pomp klaar is om te uploaden


Controleer of uw pomp niet een van de volgende schermen heeft:



- Geen tijdelijk basaal actief
- Geen alarmen
- Geen actieve bolus
- Geen lage batterij


UPLOAD UW POMP OF METER IN 2 EENVOUDIGE STAPPEN

STAP 1

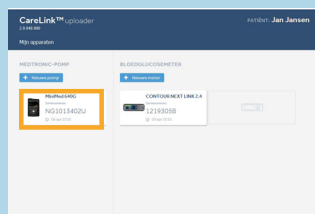

Selecteer het apparaat

STAP 2

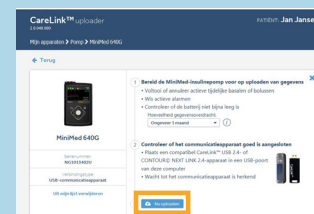

▪ Zorg dat uw apparaat klaar is om te uploaden

▪ Klik "Nu uploaden"

Veiligheidsinformatie: CareLink™ software

Dit therapiemanagementsysteem is bedoeld om te worden gebruikt in combinatie met het advies van een arts en/of diabetesverpleegkundige die vertrouwd is met de diagnose en behandeling van diabetes. Wijzig niets aan uw behandeling zonder hier vooraf met uw arts en/of diabetesverpleegkundige over te praten.

Raadpleeg ook onze website, voor meer informatie www.medtronic-diabetes.nl/klantenservice/carelink

LINK MET UW ZORGVERLENER



Link met het CareLink™ systeem van uw zorgverlener voor het efficiënt delen van data