

# INSTALLATIE HANDLEIDING

## Nieuwe CareLink™ Personal uploader

HAAL HET MAXIMALE  
UIT HET BEZOEK BIJ  
UW ZORVERLENER  
DOOR UW POMP  
TE UPLOADEN IN  
CARELINK™



Krijg meer inzicht in uw  
glucosepatronen



Upload uw  
pomp regelmatig



Overleg met uw zorgverlener

## GA AAN DE SLAG DOOR EERST DE NIEUWE UPLOADER TE INSTALLEREN


Een eenmalige installatie op  
de computer(s) waar u uw  
pomp wilt lezen



- 1 Log in
  - Klik op "Instalatie-instructies voor uploader"




- 2 Klik op de link om de  
uploader te downloaden

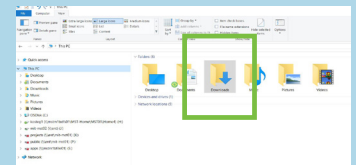


- 3 Zoek het bestand wat u  
heeft gedownload


## NADAT U DE UPLOADER HEEFT GEDOWNLOAD, KUNT U DE UPLOADER INSTALLEREN

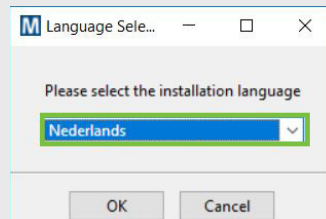


- 1 Kies de juiste taal

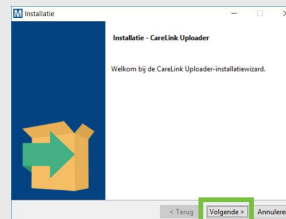

- 2 Klik "Volgende"

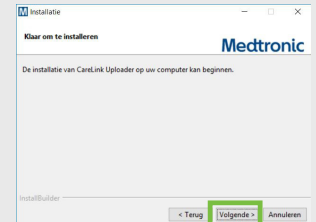

- 3 Klik "Volgende"

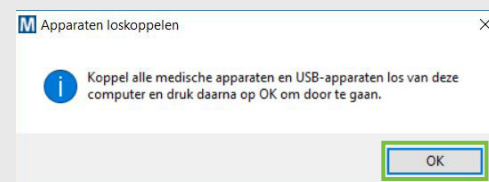

- 4 Zorg ervoor dat uw meter niet is aangesloten op uw computer en klik "Ok"
  - Klik "Voltoeien"

Nu bent u klaar op  
uw pomp te uploaden.  
Ga naar de 'Upload  
handleiding' om uw  
pomp te uploaden.

Ga terug naar de  
CareLink™ Personal  
homepage om uw meter  
of pomp up te loaden.

Ga naar de volgende pagina  
voor de upload instructies.

Medtronic